

Návod k použití



GEMINI TWIN S, M, L

Anatomická opěrka zad nízká / střední / vysoká



Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.



Vážený zákazníku,

výrobek, který se chystáte používat (GEMINI TWIN S, M, L - anatomická opěrka zad) je zdravotnický prostředek a měl by primárně sloužit k účelům, ke kterým byl vyroben a následně schválen pro použití příslušnými institucemi.

GEMINI TWIN S, M, L - anatomická opěrka zad (dále jen „opěrka GEMINI TWIN“) je určena k instalaci do invalidního vozíku nebo jiného zdravotnického prostředku, který souvisí s podporou dlouhodobého sezení a který její instalaci umožňuje. **Opěrka je primárně indikována především pro osoby dlouhodobě sedící**, kterým umožňuje stabilní, anatomicky komfortní a bezpečný posez. Opěrka GEMINI TWIN pomáhá zajistit posturální stabilitu, vzpřímený a symetrický sed s maximálním rozložení tlaku na celou opěrnou část se zachováním fyziologického zakřivení

páteře, udržení optimální tělesné teploty a odvod tělesné vlhkosti. Zároveň opěrka umožňuje částečnou korekci polohy sedu např. při vychýlení páteře. Opěrka GEMINI TWIN je dodávána v širokém spektru rozměrů a je vhodná také pro instalaci do dětských vozíků.

Opěrka GEMINI TWIN není vhodná pro osoby s velkou deformitou páteře, osoby s velmi nestabilní a neklidnou polohou sedu. Opěrka GEMINI TWIN nenahrazuje trupovou ortézu nebo jiné korekční či zádržné systémy sezení.

DODÁNÍ VÝROBKU

Opěrku GEMINI TWIN můžete získat buď jako **dodavatelem instalovanou součást invalidního vozíku** nebo jako **samostatný výrobek**, jehož instalaci na vozík provedete svépomocí. Výrobce přesto doporučuje svěřit instalaci odbornému servisu nebo dodavateli.

A/ Opěrka GEMINI TWIN je již instalována na vozík dodavatelem

V případě instalace provedené dodavatelem je opěrka umístěna na vozík dle parametrů, které byly předmětem objednávky výrobku. Je však možné, že bude nutné polohu opěrky upravit (doladit) tak, aby dokonale vyhovovala uživateli a splňovala účel, ke kterému je určena, a to především ze zdravotního hlediska. Dbejte proto prosím zvýšenou pozornost správnému nastavení opěrky


i v případě, že je dodána s vozíkem. Nastavení opěrky GEMINI TWIN je popsáno v kapitole IV. Pro snadnější prvotní nastavení opěrky na vozík **můžou být šroubované spoje dodávány v uvolněném stavu!**

Pro dokončení nastavení opěrky a před prvním použitím je nutné všechny spoje zkontrolovat a dotáhnout!

**B/ Instalace svépomocí**

Pokud opěrku budete instalovat svépomocí, dodržujte prosím základní pravidla a postup instalace v kapitole III. tohoto návodu, a to včetně doporučení pro nastavení od vašeho lékaře či ergo/fyzioterapeuta.

Samotná instalace opěrky GEMINI TWIN na vozík není složitá a měl by ji zvládnout běžně zručný uživatel.

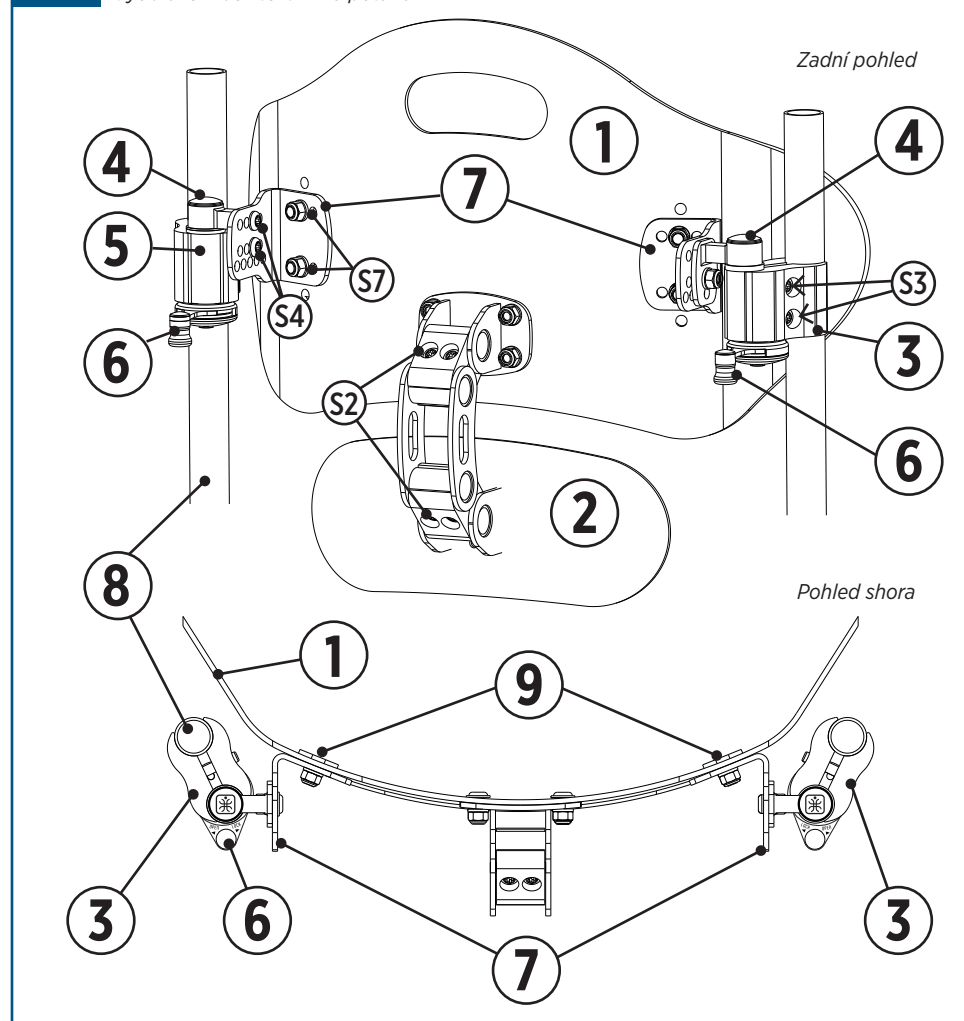OBR 1 Vyobrazení bez textilního potahu**ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI**

1. deska zádové opěrky
2. bederní opěrka
3. objímky
4. nosné čepy
5. pouzdro
6. aretační páčky
7. L-držáky
8. zádové trubky vozíku
9. příložky L-držáků

SPOJOVACÍ PRVKY

- S2 - šrouby pro nastavení polohy bederní opěrky
 S3 - jistící šrouby na objímce P+L
 S4 - šrouby pro nastavení sklonu opěrky (nosného čepu) P+L
 S7 - jistící matice L-držáků P+L

I. OBSAH BALENÍ

1. GEMINI TWIN S, M, L - anatomická opěrka zad (pro velikost S a M v kompletu s bederní opěrkou)
2. návod k použití
3. 1ks stranový klíč č. 10
4. 1ks klíč
5. 1ks kontrolní jednotka Sunfibre (pro verzi Be Seen Line)
6. 1ks nabíjecí kabel micro USB (pro verzi Be Seen Line)
7. 2ks hrudní peloty (jsou-li součástí dodávky)



II. POPIS A ZÁKLADNÍ FUNKCE VÝROBKU

Opěrky GEMINI TWIN jsou vyráběny ve třech výškách a v různých šířkách při zachování proporční konturace (viz *tabulka na poslední straně tohoto návodu*). Nosná konstrukce hlavní opěrky i bederní opěrky je tvořena vysokopevnostní hliníkovou deskou s kvalitní povrchovou úpravou.

Na nosnou desku je pomocí zdrhovadel a popruhů se zdrhovadly připevněno čalounění tvořené kvalitním kontaktním potahem (více v části V. *Textilní potah*).

Opěrka GEMINI TWIN je uchycena k vozíku tzv. dvoubodově pomocí aretačního mechanismu.

Bederní opěrka

U opěrek velikosti (typu) „S“ a „M“ je hlavní opěrná část dodávána s tzv. bederní opěrkou (*OBR 1*), která pomáhá ergonomickému postavení bederní a pánevní oblasti páteře a zároveň vyplňuje prostor mezi hlavní opěrkou a sedacím polštářem (sedačkou). Bederní opěrka je nezávisle nastavitelná výškově, v horizontální rovině i v náklonu. V případě potřeby ji lze odmontovat a používat opěrku GEMINI TWIN bez této bederní opěry.

Hrudní (boční) peloty

(*doplňková výbava*)

Opěrku GEMINI TWIN lze vybavit doplňkovým příslušenstvím - hrudními pelotami. Peloty (pravá a levá strana) slouží pro další fixaci vzpřímené polohy sedu v oblasti hrudního koše. Jejich instalace je určena především pro osoby s rozšířenou indikací pro jejich použití. Peloty jsou montovány přímo na zádový plech opěrky. Jejich pozici lze výškově upravit podle potřeby, stranově nezávisle na sobě. Polstrování lze sejmout a práť v pračce běžným způsobem (viz dále v oddílu *Textilní potah*). Po opětovném nasazení zajistěte čalounění páskem se suchým zipem proti posunu či sklouznutí.

Uchycení

Součástí opěrky GEMINI TWIN je dvoubodový upevňovací mechanismus (opěrka je zavěšena na vozíku na 2 místech) *OBR 1*. Ten je tvořený objímkami s pouzdry a aretačním mechanismem (3), upevněnými na zádových trubkách vozíku (8) a nastavitelnými L-držáky (7) s nosnými čepy (4), upevněnými na samotné opěrce.

Důležité: Základním předpokladem snadné manipulace s opěrkou (vyjmutí a nasazení) je správné umístění objímek (3) na vozíku (OBR 3, 4, 5)!



Pokud objímky nejsou na zádových trubkách ve stejné výšce a správně vycentrovány, dojde ke křížení při zasouvání závěsných čepů a opěrku nelze zaaretovat (viz *OBR 7*)! Toto je nepřijatelný stav a je nutné v takovém případě upravit a srovnat polohu objímek (viz odd. III *INSTALACE*). Samotná opěrka (resp. nosné čepy (4)) musí do pouzder na objímkách (5) lehce zapadnout bez další pomoci (zatlačení apod.).

Aretace

Během používání musí být zádová opěrka správně umístěna v držácích a aretována jisticími páčkami (6) (páčky se aretují směrem dovnitř - poloha LOCK).

Nepoužívejte nikdy zádovou opěrku bez aretace!



Pokud není aretace možná, závěsné čepy nezapadly korektně do své polohy. Zkontrolujte výškové umístění objímek (3) na zádových trubkách (*stejná výška V3*), zkontrolujte pouzdro (5) zda neobsahuje cizí předmět, zkontrolujte výškové umístění držáků s čepem (4) na opěrce (viz oddíl III *INSTALACE*) pravá vs. levá strana, popř. kontaktujte servisní středisko.

Pro vyjmutí opěrky odjistěte páčky směrem ven (poloha OPEN). Opěrku lze poté z držáků lehce vyjmout směrem nahoru - za držátko v horní části opěrky. Pokud nevládnete opěrku vyjmout 1 rukou, pomozte si druhou rukou zespo- du nadzvednutím celého kompletu.

Špatná instalace či nevhodné umístění opěrky GEMINI TWIN na invalidní vozík může být zdrojem následných zdravotních komplikací! Výrobce v takovém případě nenese odpovědnost za tuto skutečnost pokud nastane.

III. INSTALACE

Obecné informace

Správná výška zádové části opěrky je zásadní parametr pro kvalitní oporu trupu, stejně jako výška umístění horní hrany opěrky vůči zádům uživatele V1. Při měření výšky i umístění zádové opěrky je důležité vzít v úvahu - jestli, a na jakém (antidekubitním) sedáku či sedací podložce bude uživatel sedět (především výška sedáku). Pro příliš nízkou instalovanou opěrku je typická ztráta stability uživatele, snaha se-

souvat pánev na vozíku dopředu a ohýbat tak páteř vpřed (tzv. kafotizace).


Při vysoko instalované opěrce uživatel nedokáže napřímít trup, protáhnout vrchní partii, je omezen pohyb přes lopatky včetně rukou (pohon vozíku), hrozí větší náchyllost na otlaky a odřeniny.

Věnujte zvýšenou pozornost správnému výběru typu opěrky, popř. konzultujte výběr vhodného typu tohoto zdravotního prostředku s odborníkem (ergoterapeutem).

Před instalací:

- **Opěrku GEMINI TWIN instalujte a nastavujte vždy na neobsazeném vozíku!**
- **Zkontrolujte správnou šířku opěrky vs. šířku vozíku (viz. tabulka rozměrů na zadní straně návodu).**
- **Pro snadnější prvotní instalaci opěrky na vozík jsou šroubované spoje dodávány v uvolněném stavu! Po dokončení instalace je nutné všechny spoje zkontrolovat a dotáhnout!**

OBR 2

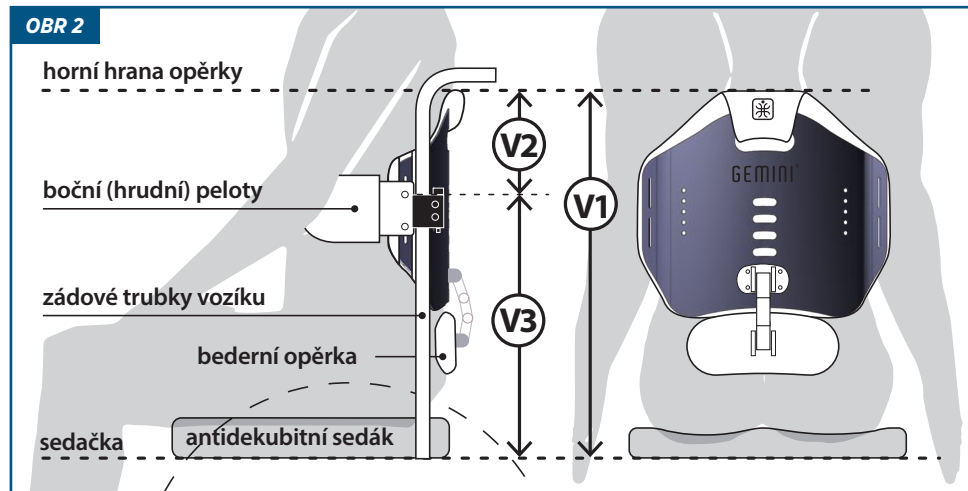

Základní instalace

1. Před vyjmutím opěrky z přepravního obalu uvolněte z opěrky objímky s aretačním mechanismem (3) (páčky do polohy OPEN).

POZN: Objímky jsou optimalizovány pro nejčastější průměr zádových trubek 22 mm.

2. Pomocí přiloženého klíče uvolněte na objímkách šrouby (S3) a nasadte objímky na zádové trubky vozíku ve stejné výšce V3 a lehce dotáhněte tak, aby objímky na trubkách udržely zasunutou zádovou opěrku, ale bylo možné s nimi otáčet.

Správnou výšku umístění horní hrany objímek V3 na obou stranách vozíku od sedačky odečtete tímto způsobem (OBR 2 + OBR 3):


- odečtete vzdálenost V2 od požadované výšky horní hrany opěrky V1 včetně textilního potahu
- vzdálenost V2 je z výroby nastavena na 20 cm po textil - tj. 17 cm po horní hranu plechu, a umístění L-držáků (7) je v prostřední poloze v otvorech na plechu zádové části (B7)
- vzdálenost V2 může být později upravena výškovým posouváním L-držáků (7) v otvorech v nosném plechu opěrky (B7)



POZOR! V3 vpravo = V3 vlevo! Kontrolu můžete provést např. i vodováhou (OBR 4), pokud je vozík na rovině.

3. Do pouzder aretačního mechanismu (5) zasuňte opatrně zádovou opěrku takto (OBR 5):

- nejprve srovnajte úhel objímek (3) jejich pootočením na trubkách vozíku (8) vůči sobě tak, aby bylo možné lehce zasunout oba čepy, tj. vzdálenost středů pouzder R5

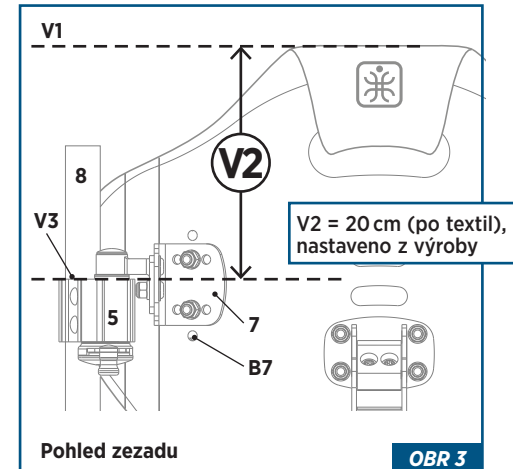



musí odpovídat vzdálenosti čepů R4, při dodržení osové (středové) souměrnosti

- nyní opatrně zasuňte opěrku (čepy) do pouzder
- pokud nelze opěrku zasunout lehce - dopravte vzdálenost R5 nebo srovnajte výšku V3 vpravo i vlevo



POZOR! Nezatlačujte čepy násilím do pouzder! Mohlo by dojít ke vzpříčení.

- 5. Pokud čepy volně zapadly a lze je páčkou (6) - OBR 6 aretovat (poloha LOCK), je instalace opěrky na vozík správná.



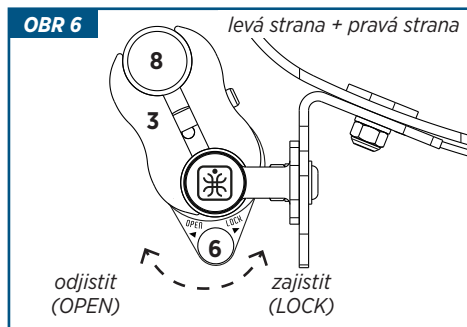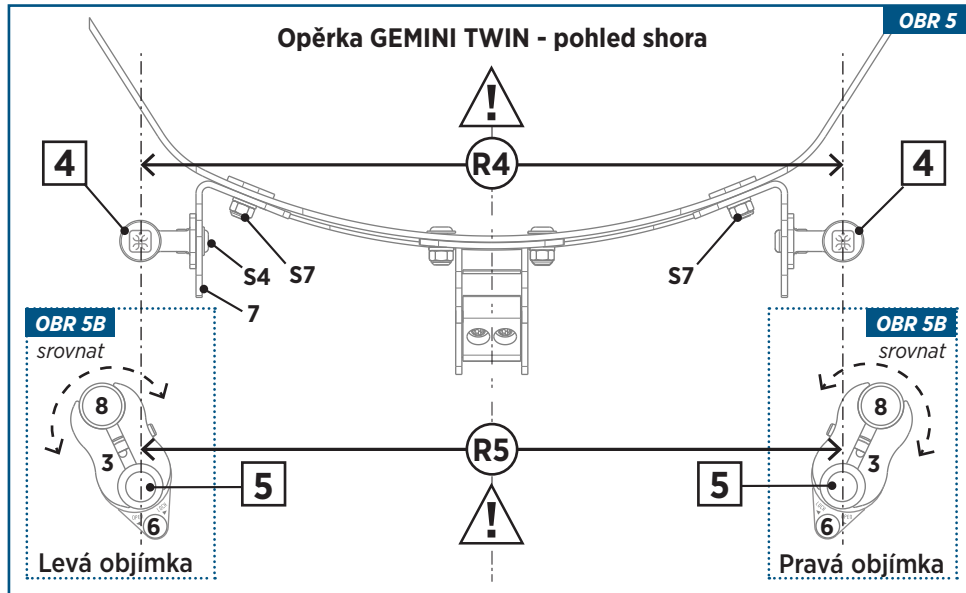

POZOR! Pokud nelze opěrku zasunout do čepů volně až na doraz, opěrku nelze aretovat! (OBR 7) Délka závěsných čepů sice neumožňuje samovolné vypadnutí opěrky z objímek v základní poloze, ale výrobek nemůže plnit svou funkci a proto opěrku nelze v takovém případě používat.

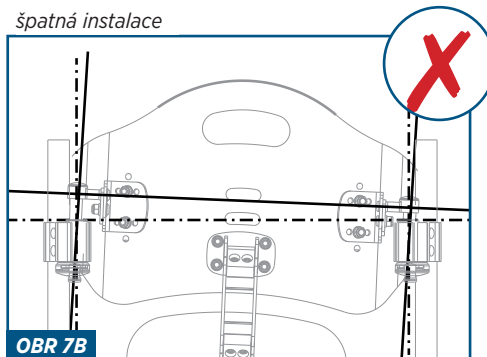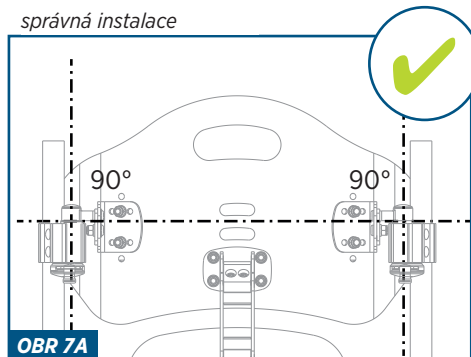

- Opěrku zaaretujte pomocí páček (6) na obou stranách a dotáhněte všechny šrouby na objímkách (S3). Šrouby dotahujte střídavě na obou stranách trubek! Pozor na únosnou mez deformity zádočných trubek vozíku!
- Opěrku odaretujte (poloha OPEN) a zkuste vyjmout a zpět nasadit.

IV. NASTAVENÍ

Přesto, že získáte opěrku GEMINI TWIN již namontovanou s vozíkem, může se stát, že nastavení opěrky vám nebude vyhovovat. Stejný případ může nastat i po delší době užívání, kdy se např. změní váš zdravotní stav, nebo nastavení vozíku, těžiště, či výška sedacího polštáře. V takovém případě lze jednoduše upravit nastavení:

Vertikální posun

Výška V1:

- vyjměte opěrku z vozíku
- uvolněte šrouby (S3) na objímkách na zádočných trubkách vozíku (3)
- pro nastavení požadované výšky V1 postupujte podle odd. III, bod 2 a 3 tohoto návodu

Výška V2:

- vyjměte opěrku z vozíku
- **sejměte čalounění** - uvolněte vertikální textilní popruhy na zadní straně opěrky, uvolněte provlečené čalounění v držátku na horní straně opěrky a celé čalounění „odtrhněte“ ze suchých zipů na vnitřní zádočné části plechu opěrky.
- na zadní straně opěrky vyšroubujte matice (S7) a uvolněte příložky (9)

Přesvědčte se, že tento úkon lze provést opakovaně lehce spolu s bezpečnostní aretací LOCK-OPEN (6). Pokud nelze hladce nasazovat opěrku, vraťte se k bodu 3.

- Opěrka je tímto na vozík nainstalována v základní poloze.



na vnitřní straně opěrky

- posuňte příložky (9) do požadované polohy v otvorech (B7) - POZOR souměrně na obou stranách opěrky!
- nasadte L-držáky (7) zpět na šrouby na zadní straně opěrky a utáhněte matice (S7)
- **nasadte čalounění** zpět na opěrku - nasadte potah na opěrku a přitlačte čalounění na suchý zip na vnitřní kontuře plechu opěrky odpovídajícími protikusy, a zajistěte vertikální textilní popruhy na zadní straně opěrky, do horního držátka provlékněte textilní čalounění a přitlačte ho na suchý zip.

Horizontální posun

Horizontální posun slouží k upravení polohy (vzdálenosti) opěrky vzhledem k zádočným trubkám vozíku (OBR 8A).

- vyjměte opěrku z vozíku
- uvolněte šrouby (S4) a uvolněte L-držáky z čepů
- posuňte L-držáky vpřed nebo vzad do požadované pozice a pomocí šroubů (S4) opět přišroubujte k čepům (ve spodní části L-držáku volte otvory v horní řadě)
- stejný postup zopakujte na druhé straně úchytového systému opěrky

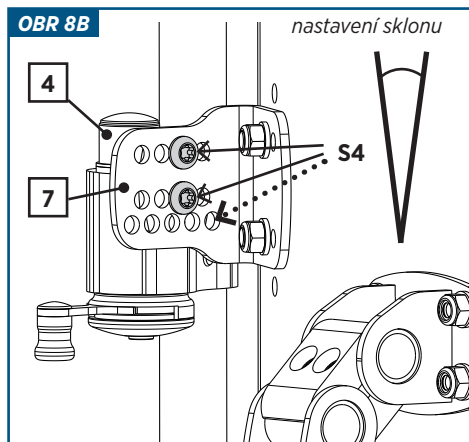
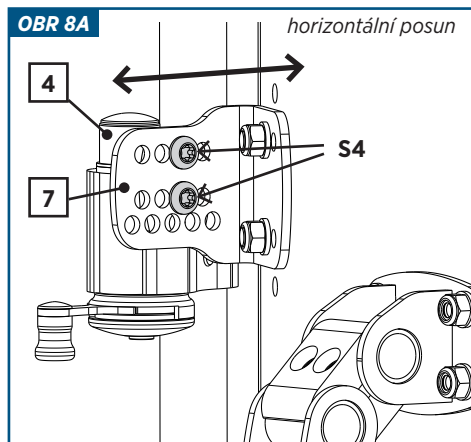


- Nosný čep (4) musí být zajištěn VŽDY oběma šrouby!

Sklon / záklon

Úprava sklonu slouží k naklopení opěrné části opěrky vzhledem k horizontální rovině (sedu). Upravením úhlu sklonu zároveň měníme úhel sedu (pokud nevyhovuje úhel 90°). Je to potřeba v případě korekce sedu uživatele nebo např. při montáži opěrky na zádové trubky, které jsou na vozíku již v určitém úhlu zalomení apod. (OBR 8B)

- zaaretujte opěrku na vozíku
- uvolněte vrchní i spodní šroub (S4) pro uvolnění L-držáků (7) z čepů (4)
- nastavte nový požadovaný sklon L-držáku (7) vůči nosnému čepu (4) a zajistěte polohu v příslušném otvoru na L-držáku pomocí šroubů (S4) - volte odpovídající spodní řadu otvorů pro požadované nastavení sklonu zádové části (!)
- stejný postup zopakujte na druhé straně úchytového systému opěrky
- Nosný čep (4) musí být zajištěn VŽDY oběma šrouby!**

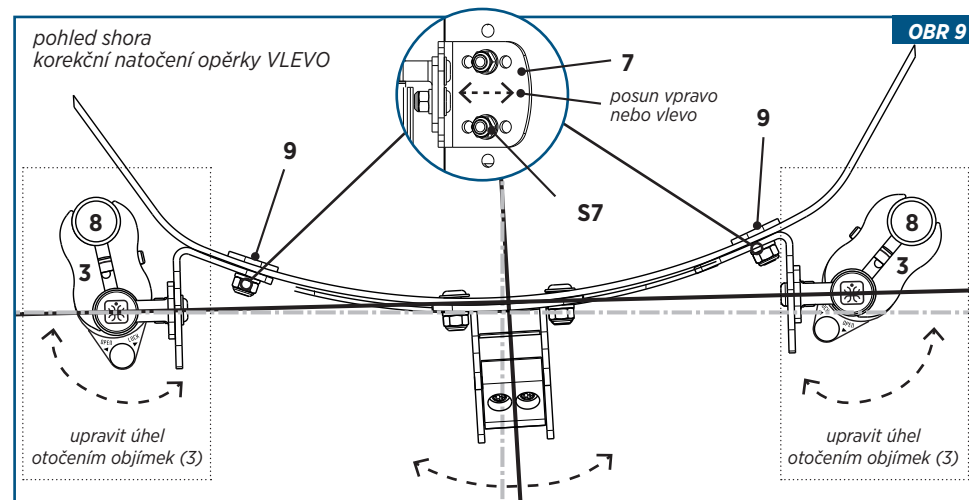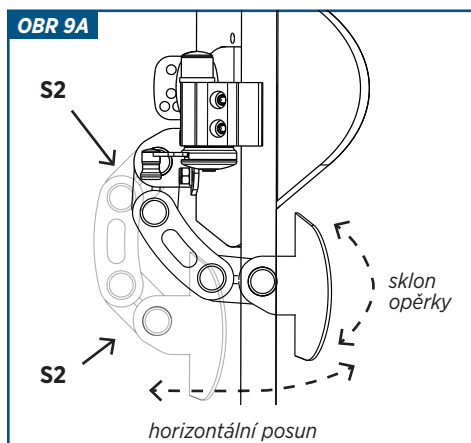

Bederní opěrka

Bederní opěrku lze nastavit dle potřeby v horizontální rovině (OBR 9A+9B). Po uvolnění šroubů (S2) na držácích bederní opěrky nastavte požadovanou pozici (dopředu, dozadu, neutrální nebo změňte sklon bederní opěrky). Šrouby poté pevně dotáhněte.

Bederní opěrku lze z hlavní zádové části odmontovat:

- vyjměte opěrku z vozíku
- sejměte čalounění (viz odst. vertikální posun)
- uvolněte 4 matice na držáku bederní opěrky a opěrku sejměte
- nasadte čalounění (viz odst. vertikální posun)

Opačným postupem bederní pěrku namontujte zpět.

Korekční nastavení

Opěrka GEMINI TWIN umožňuje díky své konstrukci nastavení pro částečnou korekci sedu. Jde především o vychýlení středové osy zádové části (OBR 9), úpravu vertikálního sklonu, horizontální

posun nebo posun bederní části páteře dopředu (typ S, M). Tuto vlastnost lze podpořit instalací hrudních pelot (příplatková výbava) pro další podporu vzpřímeného sedu.

- vyjměte opěrku z vozíku
- sejměte čalounění (viz odst. vertikální posun)
- uvolněte matice (S7) a uvolněte L-držáky (7) z příložek (9)
- posuňte L-držáky do nové pozice (OBR 9): doleva nebo doprava a to na obou stranách stejným směrem (!)
- přišroubujte maticemi (S7) L-držáky v nové pozici zpět k příložkám (9)
- nasadte čalounění (viz odst. vertikální posun)
- uvolněte šrouby (S3) na objímkách (3) na zádových trubkách vozíku (8)
- rukou upravte pootočením (vyosením) úhel objímek (3) (viz OBR 9) požadovaným směrem, tak, aby i v nové pozici rozteč pouzder (R5) odpovídala rozteči nosných čepů (R4) (R5 = R4), aby opěrka šla zasunout do objímek

bez omezení (zohledněte možnosti pro toto nastavení, aby nedošlo ke kolizi s konstrukcí vozíku apod.)

- zasuněte opěrku lehce do pouzder
- pokud nelze opěrku zasunout lehce, upravte rozteč R5 a zkontrolujte výšku V3
- po ověření snadného nasazení a zaretování opěrky pomocí páček (6) na obou stranách a dotáhněte všechny šrouby na objímkách (S3). Šrouby dotahujte střídavě na obou stranách trubek! Pozor na únosnou mez deformity zádoových trubek vozíku!



OBR 10

Hrudní peloty

Pokud je zádoová opěrka vybavena hrudními pelotami, jsou již přimontovány při dodání opěrky. Jejich správnou pozici (výšku) zkontrolujte nebo nastavte tak, jak vám indikuje váš odborný lékař či ergoterapeut. Výškové nastavení provedte povolením matic na zadní straně opěrky (OBR 10) v místě uchycení pelot

a posuňte pelotu do požadované pozice. Šrouby opět utáhněte.

Peloty lze z opěrky odmontovat nebo zpět nasadit kdykoliv to situace vyžaduje. Čalounění bočních pelot je uchyceno proti posunutí pomocí pásky se suchým zipem, provlečeným v nosném plechu peloty. Čalounění lze sejmout a vyprat.

V. TEXTILNÍ POTAH

Čalounění opěrky GEMINI TWIN je tvořeno v zádové (opěrné) části kvalitním potahem z 3D distančního úpletu (100% PES textilie) se speciální vnitřní funkční textilní vrstvou OUTLAST® (akrylát potažený vrstvou s PCM kapsulemi). Tato hi-tech technologie poskytuje textilním materiálům „inteligentní“ schopnost proaktivní regulace tělesné teploty (absorpce nebo výdej tepla).

Zadní část potahu tvoří odolná, perforovaná PVC tkanina.

Vnitřní výplň čalounění je 100% přírodní latex s horizontální perforací umožňující provětrávání opěrné části. Jedná se o vysoce ekologický produkt: hygienický



vnitřní latexovou výplň lze vyjmout

nezávadný, netoxický, nekarcinogenní, hypoalergenní a bezprašný.

Potah opěrky je obecně dobře odolný proti otěru či nepřízní počasí.

POZOR! Vrchní a boční 3D tkanina potahu je však velmi náchylná na otřepání při styku se zdrhovadly (suchý zip). Vyvarujte se proto přímému kontaktu zdrhovadel s vrchní a boční částí potahu opěrky.

Kompletní čalounění je k opěrce uchyceno pomocí suchých zipů (zdrhovadel). Je tedy jednoduše možné celý potah z opěrky sejmout (viz. také oddíl IV.). Na spodní straně čalounění se nachází

zip a vnitřní latexovou výplň tak lze vyjmout a samotný vrchní potah vyprat (viz oddíl Údržba a čištění).

Důležité: Při vyjímání vnitřní výplně z potahu dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození celistvosti výplně! Netahejte za výplň silou!

Potah bederní pěrky je na nosném plechu nasazen do bočních kapes. Je možné ho sejmout a stejně jako u hlavní zádové části pomocí zipu na spodní straně vyjmout vnitřní výplň a potah vyprat.

VI. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Stejně jako exponované části všech výrobků, také zádová opěrka GEMINI TWIN postupem času podléhá opotřebení a zašpinění, závislých na intenzitě používání.



Základní čištění textilu

Potah opěrky pravidelně zbavujte prachu a usazených nečistot (vyklepáním nebo vysavačem). Při menším ušpinění očistěte potah vlhkým hadrem, jemnou houbičkou nebo velmi jemným kartáčem za použití teplé vody, popř. běžného mycího prostředku. Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo drátěnky, agresivní a silné dezinfekční přípravky nebo páru (Před použitím čistícího prostředku si přečtěte pozorně návod konkrétního čistícího přípravku!)

Větší znečištění textilu

Potah opěrky i bederní opěrky je možné sejmout (viz. také oddíl IV a V) a následně prát. Perte maximálně na 40 °C a nepoužívejte aviváž! Potahy nežehlete! Nechte volně proschnout.

Kovové části

Kovové části opěrky nevyžadují zvláštní údržbu. Opěrka neobsahuje součásti, které podléhají korozi apod. Kovové části však pravidelně zbavujte prachu a nečistot a v případě většího znečištění můžete použít standardní prostředky na čištění a údržbu kovových částí.

Zvýšenou pozornost však věnujte čistotě závěsných čepů (4) a vnitřní části pouzdra (5). Pouzdra obsahují teflonovou vložku a proto není nutné čepy nijak promazávat.

Pravidelně kontrolujte dotažení všech důležitých spojů a šroubů, abyste předešli jejich uvolnění i přesto, že jsou matice samojistící. Předejdete tak riziku úrazu.

Be Seen Line

V případě, že máte produkt vybaven zařízením Be Seen Line (svítící lemovka/

paspule), řiďte se pokyny v samostatném návodu, který jste obdrželi s ovládací jednotkou zařízení. Údržba světelné lemovky nepodléhá zvláštní péči. Pouze dbejte na to, aby lemovka, ač velmi dobře ohebná a pružná, nebyla skrípnutá, zbytečně ohýbána v ostrém úhlu či jinak mechanicky přerušována či po-

škozena. Zařízení, jímž protéká světelný paprsek by se tak stalo nefunkční.

Textilní potah s lemovkou Be Seen Line lze prát a udržovat stejně jako zbytek textilního potahu.

Více informací naleznete na stránkách dovozatele technologie: www.scilif.com.

VII. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Opěrka GEMINI TWIN je vyrobena z bezpečných a schválených materiálů. Opěrka by svými rozměry měla odpovídat proporcím uživatele, proto nepoužívejte opěrky, které vám rozměrově nevyhovují, nebo nebyly doporučeny vaším ergoterapeutem. Pročtěte si návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele. Správná funkce opěrky GEMINI TWIN je zaručena při použití v teplotním rozmezí -10 až +40 °C. Opěrku však nenechávejte dlouhodobě uskladněnou na mrazu nebo přímém slunci.

Nepoužívejte jakkoliv poškozenou opěrku - kontrolujte textilní potah a pohmatem také vnitřní část. Kontrolujte pravidelně pevnost uchycení k vozíku a dotažení šroubů a matic.

Vyvarujte se používání otevřeného ohně v blízkosti opěrky! Dbejte zvýšené opatrnosti např. při kouření! Žhavý popel či velký žár může poškodit textilní potah opěrky a ohrozit vaši bezpečnost!

V případě, že zjistíte jakákoliv poškození a výrobek nemůže plnit svou funkci, opěrku nepoužívejte a kontaktujte dodavatele nebo servisní středisko.

Důležité:

Nikdy nezvedejte vozík za úchop opěrky GEMINI TWIN!

Úchop opěrky neslouží k tlačení vozíku ani k jiné manipulaci s vozíkem.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Pokud opěrku GEMINI TWIN skladujete mimo invalidní vozík v době, kdy není používána, učiňte tak nejlépe v horizontální poloze na suchém a stinném místě (+5 až +40 °C) a nezatěžujte ji jiným předmětem.

Výrobek po uplynutí jeho životnosti zlikvidujte podle platných předpisů nakládání s odpady.

SERVIS A OPRAVY

V případě poškození nebo vyskytnutí závady na opěrce, kontaktujte svého dodavatele. Nepoužívejte poškozenou

nebo jinak nefunkční zádovou opěrku, nepokoušejte se opěrku opravit!

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje standardní záruku po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zdravotního prostředku.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím tohoto výrobku v rozporu s návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na poškození vzniklá vlivem nesprávné instalace
- na poškození vzniklá nesprávným použitím a nesprávnou manipulací
- na opotřebení, způsobená obvyklým užíváním v souladu s návodem k použití
- na vady a poškození způsobené neodborným zásahem do konstrukce




IDENTIFIKACE VÝROBKU A DALŠÍ INFORMACE

Identifikační štítek výrobku najdete pod textilním potahem v horní části vnitřní strany desky opěrky GEMINI TWIN.

Pro další informace o výrobku navštivte stránky výrobce: www.geminisystem.cz

Štítek údržby textilu najdete všitý dole ve vnitřní části textilního potahu.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED A PARAMETRY

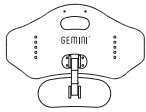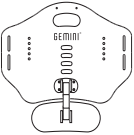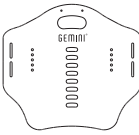				
Výška opěrky (včetně potahu)	nízká S / 27 cm	střední M / 35 cm	vysoká L / 43 cm	
Výška plechu	24 cm	32 cm	40 cm	
Konturace	7 cm			
	Šířka opěrky (včetně potahu)			
Pro šířku vozíku: (vnější rozteč zádočných trubek vozíku)	26 - 32 cm	28 cm	28 cm	-
	30 - 34 cm	32 cm	32 cm	32 cm
	34 - 38 cm	36 cm	36 cm	36 cm
	38 - 42 cm	40 cm	40 cm	40 cm
	42 - 47 cm	44 cm	44 cm	44 cm
	46 - 50 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Bederní opěrka stavitelná	✓	✓	-	
Boční peloty (příslušenství)	-	○	○	
Be Seen Line (příslušenství)	○	○	○	
Hydrografika (příslušenství)	○	○	○	

- ✓ standardní výbava
- příplatkové příslušenství



Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s používáním tohoto zdravotnického prostředku, by měla být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel usazen.

Výrobce:

SITIN LAB s.r.o., Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice, Česká republika
 info@geminisystem.cz, www.geminisystem.cz

Datum vydání: červenec 2020

Datum poslední revize návodu: 30. 5. 2022