

ŽIVOTNOST VÝROBKU

Výrobce garantuje správnou funkčnost a deklarované vlastnosti antidekubitní anatomické sedačky při obvyklém užívání po dobu 36 měsíců.

Po uplynutí této lhůty dochází k nenávratným funkčním změnám výrobku a **nelze zaručit deklarované vlastnosti této zdravotní pomůcky, proto doporučujeme antidekubitní anatomickou sedačku přestat používat a nahradit ji novým výrobkem**, předejdete tak možným následným zdravotním problémům.

Výrobek po uplynutí jeho životnosti zlikvidujte podle platných předpisů nakládání s odpady.



Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s používáním tohoto zdravotnického prostředku, by měla být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel usazen.

Výrobce:

SITIN LAB s.r.o., č.p. 28, 533 11 Zdechovice, Česká republika
info@geminisystem.cz, www.geminisystem.cz

Datum vydání: červenec 2020

Datum poslední revize návodu: 30. 5. 2022

**Návod k použití****GEMINI ALPHA**

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.



POPIS

Antidekubitní sedačka GEMINI ALPHA je zdravotnický prostředek určený primárně k prevenci následků dlouhodobého sezení s rizikem vzniku dekubitů v nejnižší rizikové skupině.

Sedačka je tvořena výplní ze speciální odolné viskoelastické polyuretanové (PU) pěny. Tato výplň je uložena v potahu z třívrstvé 3D provětrávané tkaniny odolné proti otěru. Spodní část tvoří protiskluzný pogumovaný materiál zabraňující posouvání antidekubitní sedačky po povrchu sedačky (např. vozíku). Potah je opatřen reflexním poutkem pro snadné přenášení a zvýšení bezpečnosti.

Sedačka je určena k užívání **výhradně pro 1 osobu** (z hygienických i funkčních důvodů) a vyrábí se v tloušťce 5 cm. Ostatní rozměry (šířka a délka) jsou předmětem objednávky uživatele.

Sedačka není vhodná pro osoby s hmotností nad 100 kg.

INDIKACE

Lidé s poškozením míchy jsou různě náchylní k tvorbě otlaků a může se stát, že nerozpoznají hrozící nebezpečí vzniku kožního defektu včas. Proto se této skupině uživatelů doporučuje použití preventivních pomůcek - jako jsou mimo jiné i antidekubitní sedačky. Antidekubitní sedačka GEMINI ALPHA je určena především pro osoby se sníženou pohyblivostí a dlouhodobým setráváním v poloze v sedu (na invalidním vozíku, v kočárku apod.). Dekubity se nejvíce vyskytují na sedacích hrbolech, kostrči, a na bocích. Preventivní použití antidekubitní sedačky se doporučuje i lidem s poruchou výživy z důvodu kachexie (výrazně snížená hmotnost) či naopak obezity, dále lidem se špatnou nebo nedůslednou hygienou, s omezenou mírou zodpovědnosti za péči o exponovaná riziková místa. Antidekubitní sedačka GEMINI ALPHA je určena jako základní prevence proti tvorbě dekubitů

a otlaků při dlouhodobém sezení v nejnižší třídě rizika vzniku dekubitů. **Je nutné si uvědomit, že v prevenci vzniku dekubitů je důležité kombinovat všechny dostupné a adekvátní prostředky a aktivity, které riziko vzniku dekubitů minimalizují a zhodnotit míru tohoto rizika!**

POUŽITÍ a FUNKCE

Před použitím sedačky konzultujte její vhodnost a typ provedení (tloušťku) s ošetřujícím lékařem. Pročtěte si návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte dodavatele.

Antidekubitní vlastnosti:

- preventivně působí proti vzniku prosezení v oblasti hýždí a měkkých sedacích tkání
- přispívá k rovnoměrnému rozložení váhy těla a správnému prokrvení pokožky
- pomáhá udržovat správný sed a pomáhá eliminovat smýkání na sedačce vozíku
- tlumí nárazy a vibrace při pohybu vozíku

Správná funkce antidekubitní sedačky je zaručena pro použití v teplotním rozmezí -10 až +40 °C, pokud je obsazena uživatelem. Sedačku nenechávejte dlouhodobě uskladněnou na mrazu nebo přímém slunci! V mrazivém počasí neobsazená pěna tvrdne, naopak na slunci může změknout. Tento efekt nemá vliv na další používání.

Antidekubitní sedačku správně a stabilně umístěte na sedačku (např. vozíku) protiskluznou vrstvou dolů. Přesvědčte se, že velikost antidekubitní sedačky odpovídá velikosti sedačky vozíku.

Nepoužívejte jakkoliv poškozenou sedačku - zkontrolujte potah, protiskluznou vrstvu a pohmatem také vnitřní funkční část.

3D tkanina je obecně náchylná na otřepání při styku se zdrhovadly (suchý zip). **Vyvarujte se proto přímému kontaktu zdrhovadel s 3D tkaninou.**

Antidekubitní sedačka GEMINI ALPHA není vyrobena z nehořlavého materiálu! Vyvarujte se používání otevřeného ohně v blízkosti sedačky! Dbejte zvýšené opatrnosti při kouření!

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Tak jako všechny exponované části výrobků, také antidekubitní sedačka postupem času podléhá opotřebení a zašpinění, závislých na intenzitě používání.

Menší znečištění:

Sedačku pravidelně zbavujte prachu a usazených nečistot (vyklepáním nebo vysavačem). Při menším ušpinění očistěte potah vlhkým hadrem, jemnou houbičkou nebo velmi jemným kartáčem za použití teplé vody, popř. běžného mycího prostředku. Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo drátěnky, agresivní a silné dezinfekční přípravky nebo páru! (Před použitím čistícího prostředku si přečtěte pozorně návod konkrétního čistícího přípravku!)

Větší znečištění:

Potah podložky je možné sejmut a následně prát. Perte maximálně na 40 °C a nepoužívejte aviváž. **Potah nežehejte!** Nechte volně proschnout.

Při vyjímání vnitřní pěny z potahu dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození celistvosti výplně přetržením silou!

Výplň sedačky lze propláchnout vlažnou vodou a nechat důkladně proschnout. Nikdy neperte vnitřní části sedačky v pračce!



SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Antidekubitní sedačku skladujte výhradně v horizontální poloze na suchém a stinném místě (+5 až +40 °C) a nezatěžujte ji vahou v době, kdy nebude používána.

SERVIS A OPRAVY

V případě poškození nebo vyskytnutí závady na sedačce, kontaktujte prodejce. Nepoužívejte poškozenou nebo nefunkční antidekubitní sedačku!

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky.

Záruka se nevztahuje:

- na poškození vzniklá vlivem nesprávného použití a nesprávnou manipulací s částmi výrobku
- opotřebení, způsobené obvyklým užíváním
- na vady a poškození způsobené neodborným zásahem jiného subjektu

Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé použitím tohoto výrobku v rozporu s návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

Identifikační štítek výrobku naleznete vši- ty ve vnitřní části potahu.